

Aurum

med Manuka Honning



Aurum™ - måske den
mest venlige klæber
nogensinde...



Innovators in **Stomacare**

 **stotec**

- når stomaen behøver opmærksomhed

Aurum



med Manuka Honning

Aurum™ er en helt ny og komplet serie en-dels stomibandager til både kolostomier, ileostomier og urostomier.

Aurum Urostomi

Aurum Lukkede



Aurum Tømbare



Aurum Mini Cap



Manuka Honning



En af de primære egenskaber ved Aurum™ serien er, at vi har tilsat medicinsk Manuka Honning til vores HyperFlex hydrocolloid.

Kombinationen af Manuka Honning og vores velkendte HyperFlex hydrocolloid kan være med til at fremme og bibeholde en sund peristomal hud.

Manuka Honning fra New Zealand er et rent naturprodukt, der stammer fra Manukablomstens nektar.

Honning har i mange år været kendt for dets terapeutiske egenskaber. Det er et af de tidligst kendte medicinske produkter, og det har været anvendt i årtusinder - helt frem til i dag.

Undersøgelser har vist, at denne type Manuka honning har egenskaber, der nedbryder bakterier, hæmmer inflammation og stimulerer væksten af nye celler.



Lukkede Poser


De nye af Aurum™ lukkede poser findes i posestørrelserne mini, midi og maxi og med et stort antal forskellige hulstørrelser.

Aurum™ lukkede poser har følgende egenskaber, der hjælper til med at forbedre den stomiopererendes livskvalitet:

Tilsætningen af Manuka Honning i Welland's HyperFlex hydrocolloid er med til at give huden de allerbedste betingelser.

Easy2peel™ fingergrebet øverst på pladen forebygger hudskader, og gør det let og skånsomt at løsne posen fra huden.

Det nye Dual-Carb² filter har en forbedret kulsammensætning, der effektivt deodoriserer luften. Samtidig har filteret en forbedret luftgennemstrømning, der modvirker ballooning.

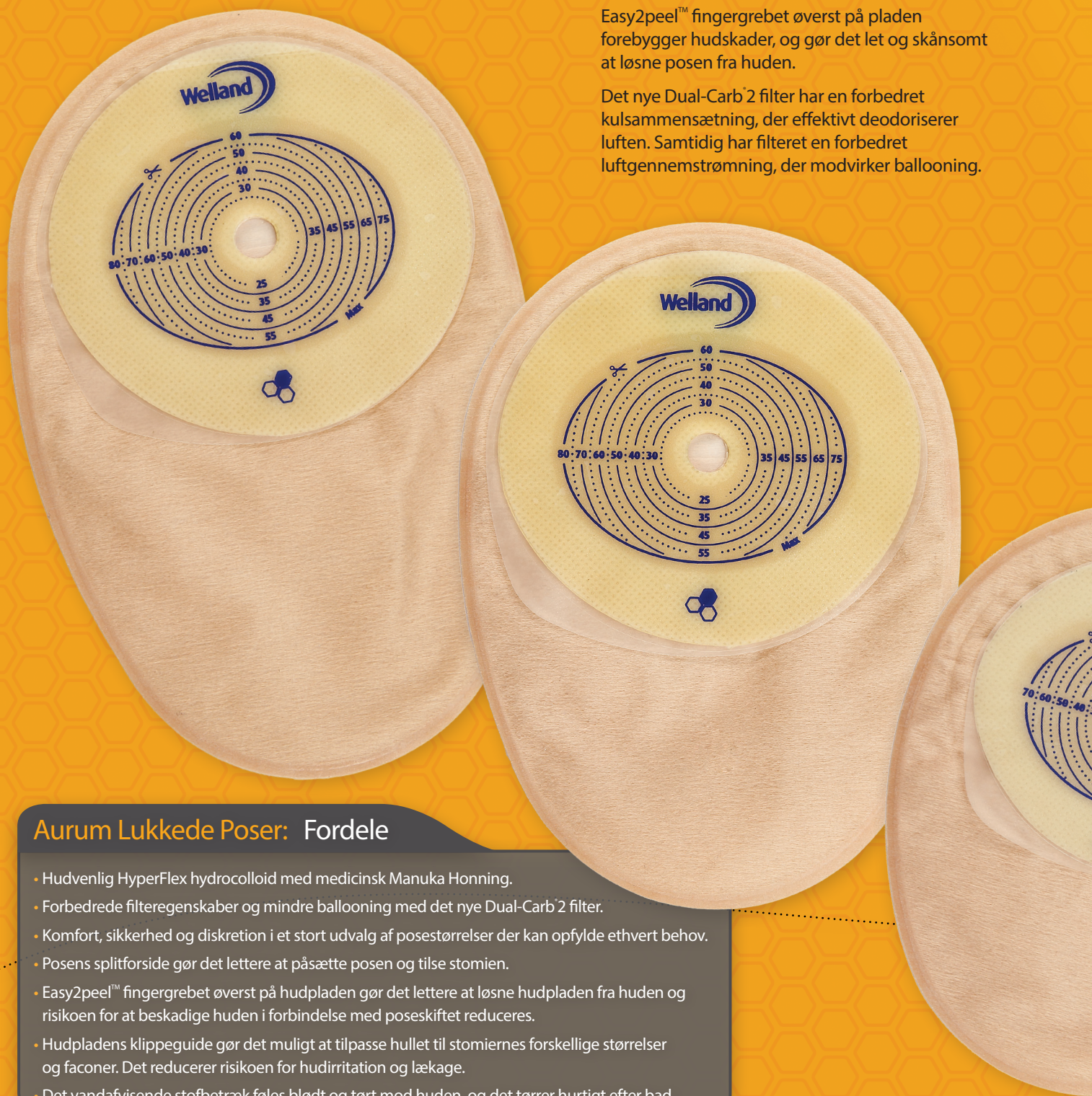

Aurum Lukkede Poser: Fordele

- Hudvenlig HyperFlex hydrocolloid med medicinsk Manuka Honning.
- Forbedrede filteregenskaber og mindre ballooning med det nye Dual-Carb² filter.
- Komfort, sikkerhed og diskretion i et stort udvalg af posestørrelser der kan opfylde ethvert behov.
- Posens splitforside gør det lettere at påsætte posen og tilse stomien.
- Easy2peel™ fingergrebet øverst på hudpladen gør det lettere at løsne hudpladen fra huden og risikoen for at beskadige huden i forbindelse med poseskiftet reduceres.
- Hudpladens klippeguide gør det muligt at tilpasse hullet til stomiernes forskellige størrelser og faconer. Det reducerer risikoen for hudirritation og lækage.
- Det vandafvisende stofbetræk føles blødt og tørt mod huden, og det tørrer hurtigt efter bad.



“
Jeg har slet ingen problemer
med rød hud mere
- en forbedring i forhold til
min tidligere pose ”



Aurum Lukkede Poser

Varenummer	Stk/æske	Posestr.	Hulstr./mm	Farve
XMHCS513	30	Mini	13 - 50 x 70	Beige
XMHCS519	30	Mini	19	Beige
XMHCS522	30	Mini	22	Beige
XMHCS525	30	Mini	25	Beige
XMHCS529	30	Mini	29	Beige
XMHCS532	30	Mini	32	Beige
XMHCS535	30	Mini	35	Beige
XMHCS538	30	Mini	38	Beige
XMHCS544	30	Mini	44	Beige
XMHCM513	30	Midi	13 - 60 x 80	Beige
XMHCM519	30	Midi	19	Beige
XMHCM522	30	Midi	22	Beige
XMHCM525	30	Midi	25	Beige
XMHCM529	30	Midi	29	Beige
XMHCM532	30	Midi	32	Beige
XMHCM535	30	Midi	35	Beige
XMHCM538	30	Midi	38	Beige
XMHCM544	30	Midi	44	Beige
XMHCL513	30	Maxi	13 - 60 x 80	Beige
XMHCL519	30	Maxi	19	Beige
XMHCL522	30	Maxi	22	Beige
XMHCL525	30	Maxi	25	Beige
XMHCL529	30	Maxi	29	Beige
XMHCL532	30	Maxi	32	Beige
XMHCL535	30	Maxi	35	Beige
XMHCL538	30	Maxi	38	Beige
XMHCL544	30	Maxi	44	Beige

Mini Cap

Welland Medical er glade for at kunne introducere en Mini Cap som en del af Aurum™ serie.

Aurum Mini Cap bruges ved irrigation eller til de, der har et regelmæssigt og forudsigeligt afføringsmønster.

En Mini Cap gør det muligt at være både aktiv og diskret på samme tid. En Mini Cap er et oplagt valg til de colostomier, der irrigeres, eller ved et regelmæssigt og forudsigeligt afføringsmønster hvor colostomien ikke er aktiv.

En Mini Cap kan også bruges i korte perioder i forbindelse med svømning, sportsaktiviteter, sex og samliv. Den er diskret uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Welland's Mini Cap har det nye Dual-Carb2 filter med en forbedret kulsammensætning, der effektivt deodoriserer luften. Samtidig har filteret en forbedret luftgennemstrømning, der modvirker ballooning.



Aurum Mini Cap: Fordele

- Hudvenlig HyperFlex hydrocolloid med Manuka Honning.
- Forbedrede filteregenskaber og mindre ballooning med det nye Dual-Carb 2 filter.
- Hudpladens klippeguide gør det muligt at tilpasse hullet til stomiernes forskellige størrelser og faconer. Det reducerer risikoen for hudirritation og lækage.
- Det vandafvisende stofbetræk føles blødt og tørt mod huden, og det tørrer hurtigt efter bad.
- Praktisk i situationer hvor det er hensigtsmæssigt med en lille og diskret bandage.

“
Faconen følger kroppen og
gør den næsten usynlig under
tøjet ”



Aurum Mini Cap

Varenummer	Stk/æske	Posestr.	Hulstr./mm	Farve
XMHSS513	30	Mini	13 - 40 x 50	Beige

Tømbare Poser

De nye Aurum™ tømbare poser findes i størrelserne mini, midi og maxi. Splitbagsiden gør det lettere at påsætte posen og tilse stomien. Nyt er også Dual-Carbⁱ filter, udviklet specielt til ileostomier.

Det nye Dual-Carbⁱ (Ileostomi) filter er opbygget af en ny kulstruktur med et større overfladeareal.

Det giver let passage af luften, samtidig med at lugtene absorberes.

En af det nye filters vigtigste egenskaber er PTFE membranen, der effektivt blokerer for udsivning af diverse væsker gennem filteret.



Aurum Tømbare Poser: Fordele

- Hudvenlig HyperFlex hydrocolloid tilsat Manuka Honning.
- Det nye Dual-Carbⁱ filter giver en forbedret lugtkontrol og en væsentlig reduceret risiko for lækage.
- Komfort, sikkerhed og diskretion i et stort udvalg af posestørrelser der kan opfylde ethvert behov.
- Posens splitforside gør det lettere at påsætte posen og tilse stomien.
- Easy2peel™ fingregrebet øverst på hudpladen gør det lettere at løsne hudpladen fra huden, og risikoen for at beskadige huden i forbindelse med poseskiftet reduceres.
- Hudpladens klippeguide gør det muligt at tilpasse hullet til stomiernes forskellige størrelser og faconer. Det reducerer risikoen for hudirritation og lækage.
- Welland's integrerede lukker er selvforklarende og meget let at anvende. Samtidig giver den brugeren eller plejepersonalet fuld kontrol over posetømningen.

“

Fingergrebet gjorde
det meget let
at tømme posen ”



Aurum Tømbare Poser

Varenummer	Stk/æske	Posestr.	Hulstr./mm	Farve
XMHDS513	30	Mini	13 - 50 x 70	Beige
XMHDS519	30	Mini	19	Beige
XMHDS522	30	Mini	22	Beige
XMHDS525	30	Mini	25	Beige
XMHDS529	30	Mini	29	Beige
XMHDS532	30	Mini	32	Beige
XMHDS535	30	Mini	35	Beige
XMHDS538	30	Mini	38	Beige
XMHDS544	30	Mini	44	Beige
XMHDM513	30	Midi	13 - 60 x 80	Beige
XMHDM519	30	Midi	19	Beige
XMHDM522	30	Midi	22	Beige
XMHDM525	30	Midi	25	Beige
XMHDM529	30	Midi	29	Beige
XMHDM532	30	Midi	32	Beige
XMHDM535	30	Midi	35	Beige
XMHDM538	30	Midi	38	Beige
XMHDM544	30	Midi	44	Beige
XMHDL513	30	Maxi	13 - 60 x 80	Beige
XMHDL519	30	Maxi	19	Beige
XMHDL522	30	Maxi	22	Beige
XMHDL525	30	Maxi	25	Beige
XMHDL529	30	Maxi	29	Beige
XMHDL532	30	Maxi	32	Beige
XMHDL535	30	Maxi	35	Beige
XMHDL538	30	Maxi	38	Beige
XMHDL544	30	Maxi	44	Beige



Urostomi Poser

Med den nye Aurum™ Urostomipose får man tillid til, at man kan genoptage sin hverdag. Aurum™ har helt nye og innovative egenskaber inklusiv Manuka Honning i vores hudvenlige HyperFlex hydrocolloid.

Nu med en ny og forbedret lomme til udløbet der let og diskret forhindrer udløbet i at være i kontakt med huden.

Aurum™ urostomi poserne findes i størrelserne midi eller maxi. De findes med stof på begge sider og et inspektionsvindue eller med klar forside.



Aurum Urostomi Poser: Fordele

- Hudvenlig HyperFlex hydrocolloid med medicinsk Manuka Honning.
- At udløbet kan foldes op og gemmes væk, gør posen meget diskret og komfortabel.
- Komfort, sikkerhed og diskretion i et stort udvalg af posestørrelser der kan opfylde ethvert behov.
- Posens splitforside gør det lettere at påsætte posen og tilse stomien.
- Easy2peel™ fingergrebet øverst på hudpladen gør det lettere at løsne hudpladen fra huden, og risikoen for at beskadige huden i forbindelse med poseskiftet reduceres.
- Den indvendige tilbageløbssikring reducerer risikoen for infektioner.
- Det vandafvisende stofbetræk føles blødt og tørt mod huden, og det tørrer hurtigt efter bad.



“

Udløbet var gemt godt af vejen, det generede ikke i lysken, dejlig og meget let at bruge, meget komfortabel ”

Aurum Urostomi Poser

Varenummer	Stk/æske	Posestr.	Hulstr./mm	Farve
XMHUM513	10	Midi	13- 55	Beige
XMHUM519	10	Midi	19	Beige
XMHUM522	10	Midi	22	Beige
XMHUM525	10	Midi	25	Beige
XMHUM529	10	Midi	29	Beige
XMHUM532	10	Midi	32	Beige
XMHUM535	10	Midi	35	Beige
XMHUM538	10	Midi	38	Beige
XMHUM713	10	Midi	13 - 55	Klar
XMHUM719	10	Midi	19	Klar
XMHUM722	10	Midi	22	Klar
XMHUM725	10	Midi	25	Klar
XMHUM729	10	Midi	29	Klar
XMHUM732	10	Midi	32	Klar
XMHUM735	10	Midi	35	Klar
XMHUM738	10	Midi	38	Klar
XMHUL513	10	Maxi	13 - 55	Beige
XMHUL519	10	Maxi	19	Beige
XMHUL522	10	Maxi	22	Beige
XMHUL525	10	Maxi	25	Beige
XMHUL529	10	Maxi	29	Beige
XMHUL532	10	Maxi	32	Beige
XMHUL535	10	Maxi	35	Beige
XMHUL538	10	Maxi	38	Beige
XMHUL713	10	Maxi	13 - 55	Klar
XMHUL719	10	Maxi	19	Klar
XMHUL722	10	Maxi	22	Klar
XMHUL725	10	Maxi	25	Klar
XMHUL729	10	Maxi	29	Klar
XMHUL732	10	Maxi	32	Klar
XMHUL735	10	Maxi	35	Klar
XMHUL738	10	Maxi	38	Klar



- når stomien behøver opmærksomhed



Welland Medical Ltd., Brunel Centre, Newton Road, Crawley, West Sussex RH10 9TU United Kingdom
Tel: +44 (0) 1293 615455 Fax: +44 (0) 1293 615411 Email: info@wellandmedical.com (A CliniMed Group Company)
All products marked 'Welland' and the Welland logo™ are trade marks of CliniMed (Holdings) Limited.

www.wellandmedical.com

