

PRODUKTDATABLAD

Spycra Protect

Velegnet til sår uden/med ringe sekretion. Ved væskende sår bør en absorberende bandage anvendes.

Oversiden er bi-elastisk vævet lycra, kan strækkes i længde og bredde, og følger derved kroppens konturer og bevægelser. Særdeles velegnet over led og på svært bandagérbare steder, såsom albue, armhule, lyske etc. Den glatte overflade minimerer friktion og shear-kræfter, og reducerer risiko for sekundær hudskade. Den åbne struktur sikrer høj åndbarhed, huden forbliver hel uden risiko for maceration.


Ved kortvarigt behov for absorption af sårsekret/blod, kan en sugende bandage placeres ovenpå Spycra Protect og fjernes efter 1-2 dage, hvorefter Spycra Protect anvendes alene.

Det anbefales at anvende én stor forbindelse frem for flere små.

Fugtede handsker forhindrer forbindingen i at klæbe til handskerne under applicering.

Ved behov kan hele eller dele af forbindingen løsnes og genplaceres.

Kan sidde i op til 7 dage, såfremt sår/hud tillader det.

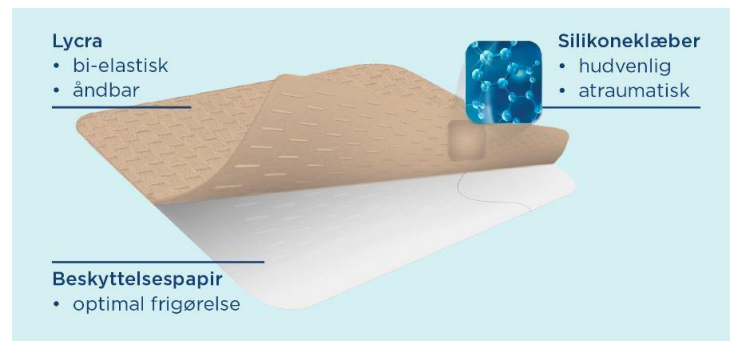

Indholdsstoffer/materiale: Lycra og medicinsk silikonegel

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: IIb

Steril: Ja

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur. Må ikke udsættes for fugt

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

PRODUKTDATABLAD

Spycra Protect

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage Forbrænding

Bemærkninger: --

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4053523	Spycra Protect	Bi-elastisk netbandage med silikoneklæb, steril.	5 cm x 150 cm.	Æske a 1 stk – krt á 5 æsker	SDSC-5150