

CODAN Spike^{SWAN} & Chemoprotect® Spike^{SWAN}

Spiken består af to kanaler- en til væske og en til luft.

Luftkanalen har to funktioner:

- At udligne det overtryk der forekommer ved tilførsel af væske i hætteglasset
- At indlufte når den færdige opløsning skal trækkes op.

Luftkanalen har et 0,2 µm filter der sikre steril ventilation og forhindre udslip af aerosoler.

Chemoprotect® Spike^{SWAN} har desuden 5 µm væskefilter.

Filteret må ikke blive vådt – hvilket gør at funktionen kan ophører.

Brugervejledning

1. Hætteglas placeres på fladt underlag
2. Stik spike gennem hætteglassets membran
3. Af sprit SWAN og sæt sprøjte på
4. Sprøjten drejes en kvart omgang, hvilket fastgør sprøjten
5. Tilfør eller udtræk ønsket væskemængde
6. **Væske tilføjes:** Stil hætteglas på fast underlag og tilfør væsken i passende tempo, så udluftning kan finde sted
7. **Væske udtrækkes:** Vend hætteglasset med bunden i vejret og udtræk den ønskede mængde
8. Ved luft eller for meget væske, stilles hætteglas på fast underlag, sprøjten tømmes for luft og væske ned i hætteglasset.
9. Proceduren gentages fra punkt 6
10. Fjern sprøjten fra spiken i vandret position
11. Spiken skal forblive i hætteglasset når den kasseres

