

neodisher® MediClean forte

Alkalisk rengøringsmiddel med tensider til rengøring af termostabile og termolabile instrumenter - flydende koncentrat



Vigtigste anvendelsesområder:

Automatisk og manuel rengøring af kirurgiske instrumenter, herunder MIS-instrumenter, mikroinstrumenter, fleksible endoskoper, anæstesiudstyr, beholdere og andet medicinsk udstyr.

Egenskaber:

neodisher MediClean forte er et yderst skånsomt, alkalisk rengøringsmiddel til pålidelig fjernelse af indtørret og denatureret blod. neodisher MediClean forte reducerer mængden af organisk materiale kraftigt. Med dets indhold af alkaliske stoffer og tensider forhindrer det proteinrester i at genaflejre sig og reducerer brugsopløsningens overfladespænding.

neodisher MediClean forte opfylder gældende anbefalinger fra det tyske Robert Koch Institut (RKI) med hensyn til at minimere risikoen for overførsel af den nye variant af Creutzfeldt-Jakob sygdom (vCJD) i forbindelse med rengøring af medicinsk udstyr.

neodisher MediClean forte er velegnet til instrumenter og udstyr af rustfrit stål og instrumentstål, optik, konventionelle plastprodukter samt materialer anvendt til anæstesiudstyr. Anodiseret aluminium skal testes før behandling.

Anvendelse og dosering:

neodisher MediClean forte kan anvendes i vaskedesinfektorer såvel som i nedsæknings- og ultralydsbade. Doseringsmængden afhænger af den aktuelle anvendelse og af mængden af urenheder, som skal fjernes. Nedenstående anvisninger skal iagttages ved anvendelse af neodisher MediClean:

Automatisk rengøring af termostabile og termolabile instrumenter:

0,2 - 1,0 % (2 - 10 ml/l), for eksempel ved 50 - 60 °C, 10 minutter.

Det anbefales at anvende deioniseret vand i rengøringstrinnet og til den afsluttende skylning. Neutraliseringstrinnet, som er obligatorisk ved anvendelse af de typiske alkaliske rengøringsmidler, er ikke nødvendigt. Ved behandling af oftalmologiske instrumenter anbefales en mellemliggende skylning med vand før den afsluttende skylning.

Automatisk rengøring af endoskoper og endoskopitilbehør:

0,5 % (5 ml/l), for eksempel ved 35 - 55 °C, 5 minutter.

Manuel rengøring af termostabile og termolabile instrumenter i nedsæknings- og ultralydsbade:

0,5 - 2,0 % (5 - 20 ml/l), 10 - 30 minutter, fortrinsvis ved temperaturer op til maks. 40 °C. Forny arbejdsopløsningen mindst en gang om dagen.

Manuel rengøring af endoskoper og endoskopitilbehør i nedsæknings- og ultralydsbade:

0,5 - 3,0 % (5 - 30 ml/l), 5 - 10 minutter ved temperaturer op til maks. 40 °C.

Forny arbejdsopløsningen mindst en gang om dagen.

Anvend passende doseringsudstyr til doseringen.

Efter rengøring skal neodisher MediClean forte afskylles fuldstændigt (helst med deioniseret vand).

Bland ikke med andre produkter.

Følg altid instrumentleverandørens anbefalinger ang. anvendelse i henhold til kravene i DIN EN ISO 17664.

Følg altid instruktionerne fra leverandøren af vaskedesinfektoren.

Kun til professionel anvendelse.



Dorte Egelund ApS
Vestre Hedevej 15
4000 Roskilde
Tlf.: +45 4020 2576
de@dorteegelund.dk

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og beskriver mulige sikkerhedsforanstaltninger i relation til produktet, men udgør ikke en garanti for produktets egenskaber og fastlægger intet kontraktligt retsforhold.



neodisher® MediClean forte

Alkalisk rengøringsmiddel med tensider til rengøring af
termostabile og termolabile instrumenter - flydende koncentrat



Rens doseringssystem inkl. sugeslange med vand før skift af produkt.

Ved anvendelse et weigomatic® doseringssystem får du altid en nøjagtig, sikker og økonomisk dosering. Dr. Weigert er et specialiseret firma, som arbejder i overensstemmelse med WHG (Wasserhaushaltsgesetz, Tyskland). Dr. Weigert konstruerer, installerer og vedligeholder centrale og enkeltstående doseringsenheder, så de passer til de aktuelle forhold.

Tekniske data:

Vægtfylde (20 °C): 1,1 g/cm³
pH-område (2 - 10 ml/l, bestemt i deioniseret vand ved 20 °C): 10,4 - 10,8.
I postevand, blødt vand og for eksempel overført vand fra forskyl kan pH-værdien være anderledes.
Viskositet (koncentrat, 20 °C): < 10 mPa
Titreringsfaktor: 0,78 (iflg. den specielle neodisher MediClean forte titreringsmetode)

Indholdsstoffer:


Indholdsstoffer i henhold til EU-forordning nr. 648/2004/EF ang. vaske- og rengøringsmidler:
< 5 % non-ioniske og anioniske overfladeaktive stoffer.
Indeholder endvidere enzymer.

CE-mærkning:



neodisher MediClean forte opfylder kravene for medicinsk udstyr i henhold til EU-direktiv 93/42/EF.

Opbevaring:

Opbevar neodisher MediClean forte køligt, men frostfrit. Opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 0 og 25 °C. 2 års holdbarhed ved anbefalet opbevaring. For udløbsdato henvises til mærkningen ved timeglassymbolet  på etiketten.

Advarsler og sikkerhedsanvisninger:

neodisher MediClean forte er ikke et farligt produkt i henhold til EU-direktiv 1999/45/EF ang. klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater.

Bortskaf kun emballagen i tom og lukket tilstand. Der henvises til sikkerhedsdatablad for bortskaffelse af produktrester.

For yderligere information ang. sikkerhed henvises til EU-sikkerhedsdatablad. Dette kan fx ses på www.drweigert.de under "Service".

MB 4050 DK/2-10
05/11



Dorte Egelund ApS
Vestre Hedevej 15
4000 Roskilde
Tlf.: +45 4020 2576
de@dorteegelund.dk

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og beskriver mulige sikkerhedsforanstaltninger i relation til produktet, men udgør ikke en garanti for produktets egenskaber og fastlægger intet kontraktligt retsforhold.

