

---

# Brugsvejledning

---

## Tægetang

### KaWe

Kirudan varenummer: 60-07-000



**Kirudan** - et godt sted at handle

Du har købt et KaWe produkt. Produktet er kendt for god kvalitet og lang levetid. KaWe tægetang lever op til EU standard 93/42/EWG (standard for medicinsk udstyr).

Læs denne vejledning igennem inden brug og overhold de givne instruktioner.

## Brug

Tægetangen må kun bruges i overensstemmelse med denne manual. Inden brug skal instruktion ligeledes følges. Efter fjernelse renses såret med desinfektionsmiddel, evt. en alkoholswab. Fjernelse af flåten beskytter ikke mod patogene bakterier (borrelia), så ved mistanke om infektion bør der tages kontakt til en læge.

## Bruges til

Tægetangen kan bruges til hurtig fjernelse af flåter på mennesker og dyr. Det latinske navn for flåt er ixodes ricinus. De lever mest i skove med meget underskov, især kratskove og anden tæt vegetation. De lever af blod fra dyr eller mennesker, og kan leve i op til 2 år uden mad.

Lad være med at prøve alle de gamle husråd med at dreje flåten rundt, brænde den med et cigaretskod eller smøre vaseline på til den slipper. Man risikerer blot, at flåten »kaster op« og overfører borrelia. Derfor skal flåten fjernes hurtigst muligt med KaWe tægetang.

## Jo før flåten fjernes jo mindre er chancen for at den overføre vira og bakterier.

1. Hold tægetangen mellem tommel- og pegefinger. Træk hylstret tilbage så spidserne trækkes fra hinanden.
2. Lad spidserne gribe om flåten, slip hylstret igen, så det presser mod spidserne. Sørg for at spidserne får godt fat om flåten, så tæt på huden som muligt. Træk flåten langsomt ud. tægetangen kan også drejes rundt 2-3 gange enten med uret eller mod uret.
3. Flåten mister herved sit greb og kan let fjernes.  
Hvis det ikke lykkes at fjerne flåten i første omgang gentag proceduren.

## Det må tangen ikke bruges til

Tægetangen må kun bruges som beskrevet i denne manual. Alt anden brug af tangen er på brugerens eget ansvar og risiko.

## Rengøring

For at undgå skidt og snavs, skal tangen altid opbevares i den medfølgende kasse. Tangen kan rengøres med en fugtig blød klud. Spidserne på tangen kan desinficeres med alkohol. Herefter rengøres tangen.

## **Flere informationer, vedligeholdelse og opbevaring**

Hvis tangen opbevares korrekt, kan tangen holde i mange år.

### **Garanti**

Hvis tangen bruges under normale forhold og efter de forskrifter der står i manualen, garanteres der et års garanti fra anskaffelsesdatoen. Skal du bruge flere oplysninger eller har tangen brug for et eftersyn kontakt da din forhandler (Kirudan).

### **Gængse reservedele**

Flere informationer om tægetangen kan fås på [www.kawemed.de](http://www.kawemed.de).  
Producent: KaWe

### **Advarsel**

Før brug, steriliseres tangen med alkohol eller et andet desinfektionsmiddel, for at fjerne risiko for infektion. Flåter må kun fjernes af voksne.  
Ingen særlige forholdsregler.

### **Instruktion ved bidstedet**

Fjern skidt og snavs med en klud som smides ud.

### **Opbevaring og transport**

Ingen særlige forholdsregler.

### **Rengøringsforberedelser**

Ingen særlige forholdsregler.

### **Manuel rengøring**

Overfladedesinfektion og/eller andet rengøringsmiddel, f.eks. ren alkohol.

### **Automatisk rengøring**

Ikke muligt.

### **Desinfektion**

Overfladedesinfektion kan udføres med ren alkohol.

### **Vedligeholdelse**

Behøver ingen vedligeholdelse.

### **Kontrol og test af ydeevne**

De bevægelige dele som f.eks. at gribe håndtaget, skal let kunne bevæges frem og tilbage.

### **Pakning**

Individuelt pakket. En standard Polyethylen pose kan anvendes. Størrelsen på posen skal være i overensstemmelse med tangen, så posen kan lukkes korrekt.

### **Autoklivering**

Tangen kan autoklaveres ved 134°, hvis det er muligt.

### **Opbevaring**

Ingen særlige forholdsregler.

### **Yderligere informationer**

Ingen særlige forholdsregler.

