

PRODUKTDATABLAD

Siemens Multistix®

Multistix 10 SG

Teststrimmel til undersøgelse for glukose, bilirubin, ketonstoffer, massefylde, blod, pH, protein, urobilinogen, nitrit & leukocytter

Multistix 8 SG

Teststrimmel til undersøgelse for glukose, ketonstoffer, massefylde, blod, pH, Protein, nitrit & leukocytter.

Multistix 7

Teststrimmel til undersøgelse for glukose, ketonstoffer, blod, pH, Protein, nitrit & leukocytter.

Multistix 5

Teststrimmel til undersøgelse for blod, glukose, protein, nitrit & leukocytter.

Uristix

Teststrimmel til undersøgelse for glukose & protein
Beholderen med teststrimler er let oplukkelig.



Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Salgsenhed	Ref. Nr.*
6402300	Multistix	10SG urinstix	Æske a 100 stk.	5328339
6402304	Multistix	8SG urinstix	Æske a 100 stk.	5258055
6402305	Multistix	7 urinstix	Æske a 100 stk.	1211267
6402308	Multistix	5 urinstix	Æske a 50 stk.	7500392
6402857	Uristix	Glukose & protein urinstix	Æske a 50 stk.	4010718

*Henviser til producentens reference. Nr

PRODUKTDATABLAD

Siemens Multistix®

	Reagenser: Reagensfelterne indeholder følgende reagenser: Protein: 0,3 % w/w tetrabromfenolblå; 97,3 % w/w buffer; 2,4 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Blod: 6,8 % w/w diisopropylbenzen dihydroperoxid; 4,0 % w/w 3,3',5,5'- tetra methyl -benzidin; 48,0 % w/w buffer; 41,2 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Leukocytter: 0,4 % w/w afledt pyrrolaminosyreester; 0,2 % w/w diazoniumsalt; 40,9 % w/w buffer; 58,5 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Nitrit: 1,4 % w/w p-arsanilinsyre; 1,3 % w/w 1,2,3,4-tetrahydrobenzo(h)quinolin-3-ol; 10,8 % w/w buffer; 86,5 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Glukose: 2,2 % w/w glukose-oxidase (mikrobiel, 1,3 IU); 1,0 % w/w peroxidase (peberrod, 3300 IU); 8,1 % w/w kaliumiodid; 69,8 % w/w buffer; 18,9 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Keton: 7,1 % w/w natrium nitroprussid; 92,9 % w/w buffer. pH: 0,2 % w/w methylrødt; 2,8 % w/w brom - thymolblå; 97,0 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Massefylde: 2,8 % w/w bromthymolblå; 68,8 % w/w poly (methylvinylether/maleinsyreanhydrid); 28,4 % w/w natriumhydroxid. Bilirubin: 0,4 % w/w 2,4-dikloranilindiazoniumsalt; 37,3 % w/w buffer; 62,3 % w/w ikke-reaktive ingredienser. Urobilinogen: 0,2 % w/w p-diethylaminobenzaldehyd; 99,8 % w/w ikke-reaktive ingredienser.
Indholdsstoffer/materiale:	
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	EC directive 98/79/EC
Steril:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring åbnet/uåbnet:	Opbevares ved temperatur mellem 15 og 30°C. Opbevares tørt og beskyttet mod sollys. I den originale beholder er teststrimlerne holdbare indtil den udløbsdato (slutningen af måneden), der er trykt på beholderen. Teststrimlerne må ikke bruges efter udløbsdatoen.
Holdbarhed:	Til påtrykt udløbsdato
Bortskaffelse af vare og emballage:	Bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.