

## Forberedelse



- Overhold aseptisk teknik under hele proceduren



- Desinficér injektionsstedet som beskrevet i de lokale retningslinier



- Fjern kateteret fra pakningen og fold vingerne ned

## Anlæggelse



- Anvend dit foretrukne greb og fjern nålebeskyttelsen
- Anlæg kateteret ved en lav vinkel
- Ved første blodsignal sænk da vinklen til den næsten er parallel med huden



- Fremfør kateteret en smule, to til tre millimeter, for at sikre at kateterspidsen er i venen
- Stabilisér eventuelt kateteret ved at holde på den ene vinge
- Træk kanylen to til tre millimeter tilbage



- Andet blodsigt mellem kanylen og kateter bekræfter korrekt placering af kateteret i venen
- Fremfør kateteret helt ind i venen
- Fjern staseslangen

## Fjernelse af kanylen



- Stabilisér kateteret ved at holde på en af vingerne
- Okkluder venen lige over kateterspidsen og fjern kanylen mens du holder ved katetergreb eller gribepladen



- Hold **IKKE** på kanylebeskyttelseshætten



- Deponér kanylen i en beholder til skarpe og skærende genstande



- Luk IV-adgangen med steril prop, andet udstyr til IV-adgange eller IV-administrationsæt
- Anlæg steril forbindelse
- Gennemskyl kateteret for at sikre, at det er korrekt placeret i venen

